

## NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODEL 6769



### plusOne Prsní a tělový vibrační masér CareTouch

#### Údržba:

Přístroj před prvním použitím a následně po každém použití opláchněte teplou mýdlovou vodou.

#### Skladování:

Skladujte na suchém místě, odděleně od jiných sexuálních pomůcek. Sexuální pomůcky vyrobené z jiného materiálu se mohou navzájem poškodit, pokud se dostanou do kontaktu.

#### Kvalita:

Tento produkt je vyroben z bezpečného silikonu, který je pro lidské tělo neškodný. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### Důležité instrukce:

Nezapínejte během nabíjení nebo čištění. Během nabíjení bude kontrolka blikat, po úplném nabití bude kontrolka svítit. **Upozornění na slabou baterii:** kontrolka bude rychle blikat, když je baterie téměř vybitá. Používejte pouze 5-ti voltový USB adaptér (standardní nabíječka pro mobilní telefony). Plného nabití dosáhnete po cca 90-ti minutách. Používejte pouze lubrikant na vodní bázi. Plně vodotěsný pro zábavu ve vaně i sprše

#### Upozornění:

Přestaňte produkt používat, pokud nevyhovuje vám nebo vašemu partnerovi. Pokud se přístroj nabíjí, nevystavujte ho vodnímu proudu.

### **Tlačítko napájení:**

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Pevným stisknutím můžete procházet 10-ti nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se přístroj vypne.

Masážní přístroj plusOne prsní a tělový vibrační masér Care Touch je navržen tak, aby pomáhal zmírnit křeče a podpořit zdravou laktaci tím, že snižuje bolestivost a uvolňuje ucpané mlékovody pro novopečené maminky. Zakřivené konce poskytují cílenou masáž, zatímco 5 vibračních a 3 vyhřívací režimy vám zajistí pohodlí na každém kroku. Díky štíhlému ergonomickému tvaru můžete uvolnit svaly a zmírnit nepohodlí i bez použití rukou – stačí hladký silikonový masážní přístroj vložit do kojící podprsenky.

Skončily vaše povinnosti s kojením nebo odsáváním? Tento univerzální masážní přístroj lze používat před těhotenstvím, během něj i po něm jako masážní přístroj pro celé tělo – pro úlevu od stresu, lepší spánek a podporu celkové pohody. Ať už kojíte, máte laktaci, nebo hledáte způsob, jak zmírnit svalové křeče, masážní přístroj plusOne Care touch je dokonalým doplňkem vaší wellness rutiny.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud máte jakékoli otázky, vždy se před použitím poraďte se svým lékařem. Po čištění jemným mýdlem nebo čistícími ubrousky uložte vysušené zařízení do přiloženého úložného sáčku.

### **Jak maséra pulzující stimulátor Pleasure Beast používat:**



#### **Připravte se na zahřátí**

Začněte vložením zařízení do podprsenky a nastavte nejnižší úroveň ohřevu, abyste otestovali citlivost pokožky. Nechte zařízení v podprsence pro větší pohodlí před kojením nebo odsáváním.



#### **Ulehčete si kojení a odsávání**

Maminky – toto je pro vás! Použijte široký zakřivený konec masážního přístroje na větší oblasti prsou a těla. Jemně přitlačte na prso a pohybujte se směrem k bradavce, abyste podpořily tok mléka a předešly ucpání mléčných žláz.



### **Cílená stimulace**

Použijte speciálně tvarované špičky masážního přístroje pro intenzivní masáž a uvolnění zatuhlých oblastí prsou a těla.

### **Ovládací prvky:**

#### **1. Tlačítko napájení:**

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí.
- Stisknutím tlačítka přepínejte mezi 5 vibračními režimy.

#### **2. Tlačítko ohřevu:**

- Po zapnutí produktu stiskněte a podržte tlačítko ohřevu po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí.
- LED světlo bude pulzovat, dokud se zařízení nezahřeje, a zůstane svítit, jakmile dosáhne plného ohřevu.
- Stisknutím tlačítka ohřevu přepínejte mezi 3 úrovněmi teploty.

### **Úleva od bolesti a křečí:**

Nastavte ohřev a vibrace podle svých potřeb a aplikujte širokou zakřivenou hlavici nebo cílené špičky masážního přístroje na postižené oblasti.

### **Nabíjecí port:**

Připojte magnetickou nabíjecí hlavu k nabíjecímu kontaktu.

### **Jak nabíjet**



1. nabíjecí kontakt je malý kovový kruh umístěný na spodní straně zařízení



2. zarovnejte magnetickou nabíjecí hlavu s kontaktem.



3. kabel se magneticky přichytí na místo. Kontrolka LED tlačítka napájení bude pomalu blikat, aby signalizovala nabíjení

Při plném nabití vydrží až 1,5 hodiny provozu.

Velikost produktu: 7,29 cm × 12,7 cm × 4,17 cm

Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmí sami vyjímat nebo vyměňovat baterii, mohlo by dojít k poškození přístroje.



**Balení obsahuje:** plusOne Prsní a tělový vibrační masér CareTouch, nabíjecí kabel a návod k použití.